



RAF-S110/30

SEDILE RIBALTABILE BIANCO PER DOCCIA

MADE IN ITALY

seduta in poliuretano integrale, piastra di aggancio al muro in alluminio.



### USO E MANUTENZIONE:

Pulire la seduta e la struttura con detergenti neutri non aggressivi utilizzando un panno morbido.

### AVVERTENZE

Si raccomanda di verificare la condizione del supporto prima di installare l'accessorio e di scegliere viti adeguate al supporto esistente.

Portata massima del seggiolino 130Kg. Utilizzare il seggiolino unicamente come seduta.


Non salire in piedi.

Non adatto all'utilizzo da parte dei bambini senza adeguata sorveglianza.

Si declina ogni responsabilità per un uso improprio del seggiolino.

Fare attenzione alle mani durante le fasi di apertura e chiusura del seggiolino.

### FISSAGGIO

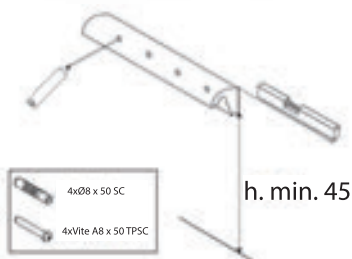


1. Posizionare la piastra sul muro ad una altezza consigliata di almeno 45cm. Verificare che la piastra sia a livello. Segnare con una matita la posizione dei 4 fori da dover praticare.




2. Forare esclusivamente a rotazione, non a percussione. **ATTENZIONE:** scegliere viti adeguate al supporto in muratura che in ogni caso deve essere di spessore minimo 10 cm.



3. Fissare la staffa al muro verificando che le teste delle viti non sporgano dalla sede.

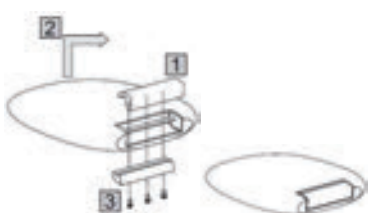

4. Inserire la seduta nella staffa e fissarla con le viti M4 in dotazione. Verificare che il movimento della seduta sia libero da impedimenti.

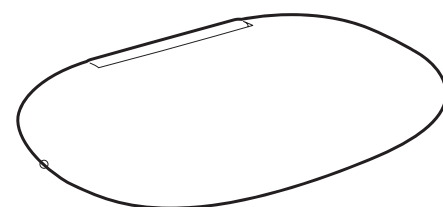

mm 397 x 338 - h 57

